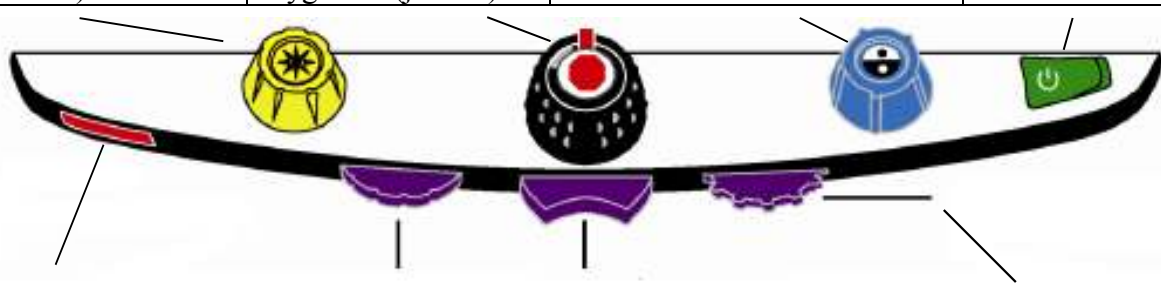


„TOPAZ XL HD“ valdymo skydelio aprašas

Ryškumo reguliatorius ir paieškos mygtukas (geltonas)	Padidinimo reguliatorius ir kadro sustabdymo mygtukas (juodas)	Spalvų reguliatorius ir kameros/kompiuterio vaizdo mygtukas (mėlynas)	Budėjimo režimo mygtukas (žalias)
			
Fokusavimo fiksavimo ir padėties nustatymo mygtukas (raudonas)	Kairysis reguliavimo ratukas (violetinis)	Skaitymo linijų/Skaitymo šablono jungiklis (violetinis)	Dešinysis reguliavimo ratukas (violetinis)

Reguliatorius/ mygtukas/ jungiklis	Funkcija
Ryškumo reguliatorius ir paieškos mygtukas (geltonas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukite, norėdami padidinti arba sumažinti ekrano ryškumą. • Paspauskite ir palaikykite mygtuko centre, norėdami padidinti vaizdą, naudodamiesi Paieškos funkcija. Atleiskite mygtuką, norėdami vėl sumažinti vaizdą.
Padidinimo reguliatorius ir kadro sustabdymo mygtukas (juodas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukite, norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą. • Paspauskite mygtuko centre, norėdami įjungti arba išjungti kadro sustabdymo funkciją.
Spalvų reguliatorius ir kameros/kompiuterio vaizdo mygtukas (mėlynas)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukite, norėdami pasirinkti geriausiai Jūsų poreikius atitinkantį spalvų režimą. • Paspauskite mygtuko centre, norėdami perjungti tarp „TOPAZ XL HD“ kameros ir prijungto kompiuterio. • Paspauskite mygtuko centre, norėdami įjungti arba išjungti vieną horizontalią skaitymo liniją, jei nesate prisijungę prie kompiuterio.
Budėjimo režimo mygtukas (žalias)	<ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite kairėn, norėdami perjungti „TOPAZ XL HD“ į budėjimo režimą. Paspauskite kairėn, norėdami įjungti „TOPAZ XL HD“ iš budėjimo režimo.
Fokusavimo fiksavimo ir padėties nustatymo mygtukas (raudonas)	<ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite, norėdami įjungti fokusavimo fiksavimo funkciją. Paspauskite antrą kartą, norėdami įjungti padėties nustatymo indikatorių. Paspauskite trečią kartą, norėdami išjungti ir padėties nustatymo indikatorius, ir fokusavimo fiksavimo funkcijas. • Paspauskite ir palaikykite nuspaukę kartu su geltono ryškumo reguliatoriaus centru, norėdami įjungti ir išjungti LED skaitymo lemputes.
Skaitymo linijų ir skaitymo šablono jungiklis (violetinis)	<p>Jungiklis yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite dešinėn, norėdami naršyti po horizontalias linijas, vertikalias linijas, vertikalius šablonus, horizontalius šablonus, arba be

	<p>jų.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite kairėn, norėdami naršyti po horizontalius šablonus, vertikalius šablonus, vertikalias linijas, horizontalias linijas, arba be jų.
Kairysis reguliavimo ratukas (violetinis)	<p>Ratukas yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasukite kairėn arba dešinėn, norėdami pakelti ir nuleisti arba pastumti ekrano kairėn ir dešinėn skaitymo linijas ir skaitymo šablonus.
Dešinysis reguliavimo ratukas (violetinis)	<p>Ratukas yra po plastikiniu gaubtu (nesimato), po valdymo skydeliu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norėdami reguliuoti horizontalias linijas ar šablonus, pasukite ratuką, norėdami pakelti arba nuleisti viršutinę liniją ar šabloną. Tokiu būdu atstumas tarp horizontalių linijų ar šablonų padidės arba sumažės. • Norėdami reguliuoti vertikalias linijas ar šablonus, pasukite ratuką, norėdami pastumti dešiniąją liniją ar šabloną kairėn arba dešinėn. Tokiu būdu atstumas tarp vertikalių linijų ar šablonų padidės arba sumažės.

Kaip pradėti naudotis „TOPAZ“

1. Įjunkite elektros laidą.
2. Įjunkite pagrindinį prietaiso jungiklį.
3. Paspauskite žalią budėjimo režimo mygtuką.
4. Nureguliuokite patogiausią skaitymui monitoriaus aukštį ir kampą.

Jei monitorius nejudą kairėn ir dešinėn, patikrinkite, ar atpalaidavote monitoriaus laikiklio kištuką (įspaudėte monitoriaus fiksavimo kištuką), esantį prie monitoriaus laikiklio pagrindo.

5. Padėkite dokumentą ar objektą ant XY skaitymo lentos.
6. Nustatykite padidinimą.
7. Nureguliuokite ryškumą.
8. Atleiskite XY lentos fiksatorių.
9. Pasirinkite spalvų režimą.
10. Jei reikia, norėdami peržiūrėti elementą, įjunkite arba išjunkite kadro sustabdymo funkciją.
11. Jei reikia, norėdami rasti monitoriuje rodomą laukelį, pasinaudokite paieškos funkcija „Find“.

Kaip pakelti „TOPAZ“

Pastaba: NEKELKITE „TOPAZ“ už LCD skaitymo lempučių

1. Užfiksukite monitoriaus laikiklį, kad jis nejudėtų kairėn ir dešinėn. Norėdami užfiksuoti, ištraukite kištuką. Norėdami atpalaiduoti, įspauskite kištuką.

Pastaba: Prieš užfiksuoiant kištuką, monitoriaus laikiklis turi būti centrinėje padėtyje.

2. Užfiksukite XY skaitymo lentą, kad ji nejudėtų, paspausdami raudoną stabdymo fiksatorių link „TOPAZ XL HD“.

Kaip pradėti naudotis „TOPAZ“

1. Įjunkite elektros laidą.
2. Įjunkite pagrindinį prietaiso jungiklį.
3. Paspauskite žalią budėjimo režimo mygtuką.
4. Nureguliuokite patogiausią skaitymui monitoriaus aukštį ir kampą.
Jei monitorius nejuda kairėn ir dešinėn, patikrinkite, ar atpalaidavote monitoriaus laikiklio kištuką (įspaudėte monitoriaus fiksavimo kištuką), esantį prie monitoriaus laikiklio pagrindo.
5. Padėkite dokumentą ar objektą ant XY skaitymo lentos.
6. Nustatykite padidinimą.
7. Nureguliuokite ryškumą.
8. Atleiskite XY lentos fiksatorių.
9. Pasirinkite spalvų režimą.
10. Jei reikia, norėdami peržiūrėti elementą, įjunkite arba išjunkite kadro sustabdymo funkciją.
11. Jei reikia, norėdami rasti monitoriuje rodomą laukelį, pasinaudokite paieškos funkcija „Find“.

Kaip pakelti „TOPAZ“

Pastaba: NEKELKITE „TOPAZ“ už LCD skaitymo lempučių

1. Užfiksukite monitoriaus laikiklį, kad jis nejudėtų kairėn ir dešinėn. Norėdami užfiksuoti, ištraukite kištuką. Norėdami atpalaiduoti, įspauskite kištuką.

Pastaba: Prieš užfiksuojant kištuką, monitoriaus laikiklis turi būti centrinėje padėtyje.

2. Užfiksukite XY skaitymo lentą, kad ji nejudėtų, paspausdami raudoną stabdymo fiksatorių link „TOPAZ XL HD“.